



# ВИБРОСТОЛИК модель ВБ КОМПАКТ 1.0



Этикетка  
**АВЕ 221.000.000 ЭТ**

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 Вибростолок ВБ КОМПАКТ 1.0** (далее - **ВБ**) используется в лабораториях или клиниках для удаления пузырьков воздуха из формовочной массы в процессах отливки моделей, заливки кювет и паковки литейных опок. ОКП 438900, ТУ 4389-022-52331864-2005.

### 1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более 80 %

### 1.3 Основные технические характеристики

- частота вибрации 3000, 6000 мин<sup>-1</sup>
- размеры рабочей поверхности столика Ø 120 мм
- электропитание ~220/230В 50Гц 0,5А
- габариты, не более 130×75×130 мм
- масса, не более 3,0 кг

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вибростолок	1 шт
Этикетка АВЕ 221.000.000 ЭТ	1 шт

## 3 УСТРОЙСТВО

### 3.1 Основные элементы

- 1 – резиновая накладка
- 2 – сетевой шнур
- 3 – переключатель частоты вибрации:
  - I – 3000 мин<sup>-1</sup>;
  - 0 – 0;
  - II – 6000 мин<sup>-1</sup>



### 3.2 Рекомендуемый режим работы:

5 минут - работа, 1 минута – перерыв.

## 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для работы:

- вставить вилку сетевого шнура в розетку;
- включить переключатель (3).

### Внимание !



При длительной непрерывной работе возможно отключение **ВБ** из-за срабатывания тепловой защиты.

Во избежание повреждения сетевого шнура не устанавливать **ВБ** задней стенкой вплотную к каким-либо объектам.

Для возобновления работы **ВБ** необходимо выключить на 10 ... 15 минут, для чего перевести переключатель частоты вибрации в положение «0».

## 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей **ВБ** от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

В случае сильного загрязнения рабочей поверхности снять резиновую накладку, промыть и **после полного высыхания** надеть обратно на металлическую платформу.

### Внимание !



### Предупреждение

Не допускать попадания влаги на металлическую платформу и внутрь вибростолика.

Запрещается работа без резиновой накладки.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

**6.1** Транспортирование **ВБ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50 °С, относительная влажность до 100 % при температуре 25 °С.

**6.2** **ВБ** должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.

Не допускается хранение **ВБ** совместно с кислотами и щелочами.

## 7 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы – 5 лет.

ПРЕТЕНЗИИ НА ГАРАНТИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ при наличии механических повреждений или доступа в конструкцию, не санкционированного Изготовителем.

**Адрес Изготовителя:**

**620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» [www.averon.ru](http://www.averon.ru)**

**тел. (343) 234-65-86, факс (343) 234-65-72**

**[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)**

**сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

<b>модель ВБ КОМПАКТ 1.0</b>	
Заводской номер	
Дата выпуска	

Контролер \_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.п.

Гарантия действительна при наличии даты продажи, печати и подписи продавца.