



МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

модель ВМУ 1.0



Этикетка
АВЕ 193.000.000 ЭТ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 1.1** Настоящий документ действителен для модуля вытяжного универсального **ВМУ АВЕРОН** (ВМУ).
- 1.2** ВМУ предназначен для удаления сухих мелко и среднедисперсных отходов при механической обработке изделий в ортопедической стоматологии и при проведении других аналогичных работ.
- 1.3** ВМУ используется совместно с пылесосывающим устройством (ПВУ)* при комплектовании рабочих мест. Рекомендуется ПВУ АВЕРОН. Быстросъемный экран предохраняет лицо и глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента. Экран удерживается на корпусе при помощи двух пазов.
- 1.4 Условия эксплуатации**
- окружающая температура 10...35°C
 - влажность при 25 °С, не более 80%
- 1.5 Основные технические характеристики**
- масса, не более 1,2 кг
 - габариты, не более 160×260×150 мм

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол-во
Корпус-пылесборник		1
Экран		1
Заглушка		1
Решетка		1
Этикетка	АВЕ 193.000.000ЭТ	1

3 КОНСТРУКЦИЯ

- 1 - Экран
- 2 - Шланг ПВУ
- 3 - Корпус-пылесборник
- 4 - Винт зажимной
- 5 - Втулка резиновая 50/40
- 6 - Заглушка
- 7 - Патрубок
- 8 - Заборник с решеткой

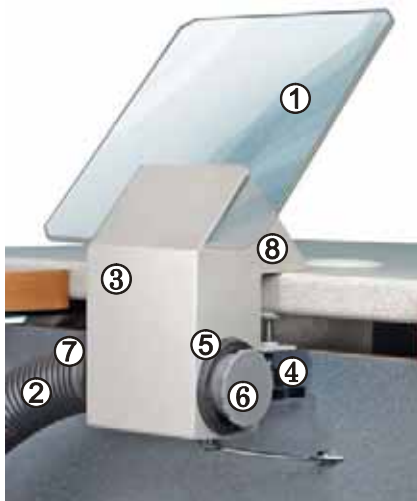

* - эксплуатируется согласно его сопроводительной документации.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установить экран на корпусе ВМУ, как показано на рисунке.

Снять с экрана защитную пленку.

Установить решетку.

Закрепить ВМУ при помощи зажимного винта.

Пример крепления ВМУ к столешнице стойки универсальной лабораторной СУЛ 3.x АВЕРОН приведен на рисунке.

Подсоединить входной шланг ПВУ, по желанию пользователя, к правому или левому выходу ВМУ.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:

- очистка с использованием ПВУ воздушных каналов ВМУ от производственных отходов;
- протирка внутренних, наружных поверхностей и экрана от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

6 ГАРАНТИИ

6.1 Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы – 5 лет.

6.2 Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

6.3 Адрес Изготовителя:

620086, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
тел. (343) 234-65-86, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

модель ВМУ 1.0	
Заводской номер	
Дата выпуска	

Контролер _____
(подпись, штамп)

Продавец _____
(подпись)
Дата продажи _____

М.п.

Гарантия действительна при наличии даты продажи, печати и подписи продавца.